

Mais informações Diagnósticas para todos os Exames Pediátricos

Com estes sistemas, o radiologista pode visualizar um número substancialmente maior de informações diagnósticas comparado com os sistemas de imagens convencionais, devido a seu nível extremamente baixo de ruído e sua alta resolução. Além disso, as informações diagnósticas aperfeiçoadas e a excelente tolerância à exposição, se traduzem em um menor número de repetições de exames.

SISTEMA KODAK INSIGHT PARA IMAGENS PEDIÁTRICAS

- Filme para imagens pediátricas KODAK InSight
- Écrans para imagens pediátricas KODAK InSight
- Cassete KODAK X-Omat
- Velocidade: 300

Este sistema oferece a alta resolução espacial necessária para diferenciar as estruturas anatômicas do recém-nascido e dos cateteres — sem aumentar o nível de ruído, que pode mascarar os padrões de determinadas doenças. Um nível baixo de ruído é especialmente importante no diagnóstico de membrana hialina em recém-nascidos prematuros.

MANUSEIO E PROCESSAMENTO DO FILME

Armazenamento do filme

Armazenar caixas lacradas em local fresco e seco (10–21°C; 30–50% de umidade relativa), protegidas dos raios X e de qualquer outra radiação penetrante.

Iluminação de segurança

Use um filtro para luz de segurança KODAK do tipo GBX-2 ou equivalente, colocado a pelo menos 1,20 m (4 pés) do filme.

Processamento recomendado

Para obter os melhores resultados, processe o filme com os químicos KODAK X-Omat.

UN SISTEMA COMPLETO

Os filmes KODAK InSight para imagens pediátricas vêm em pacotes de 100 folhas, sem entrefolhas. Os cassetes Kodak X-OMAT com écrans InSight para imagens pediátricas, também integram o sistema de imagens. Todos os componentes se encontram disponíveis nos tamanhos padrões usados no seu mercado. Para obter mais informações sobre tamanhos ou formatos específicos ou para fazer pedidos, entre em contato com o seu representante de vendas KODAK.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

Conheça mais sobre os sistemas KODAK InSight e o que eles podem fazer por você e seus pacientes. Entre em contato com o seu representante ou distribuidor autorizado KODAK hoje mesmo. Ou visite-nos na Internet: www.kodak.com.br

www.kodak.com.br

Centro de Atendimento ao Consumidor Kodak
0800 150 000

KODAK BRASILEIRA COM. IND. LTDA.
Divisão de Imagens para a Saúde
Av. Maria Coelho de Aguiar, 215 – Bloco E – 6º andar
São Paulo – SP
05804-900





Aumente a confiabilidade do Diagnóstico com Aplicativos Neonatais e Pediátricos

DIVISÃO DE IMAGENS PARA A SAÚDE
UMA MELHOR MANEIRA DE VER A VIDA.

